


Slutgiltiga ENFit-aggregat från Nutricia

Från och med ~ v.3 2017 kommer Nutricia lansera Flocare® Infinity aggregat med ENFit-fattning. Dessa aggregat kommer att ersätta övergångsaggregaten och är sista etappen i övergångsperioden mellan ENLock och ENFit-fattning.

Vad innebär detta i praktiken?

- De nya ENFit-aggregaten kommer nu **inte** ha någon övergångsadapter varken vid kopplingen mot infart (PEG/sond/knapp/gastrostomitub) eller på medicinporten.

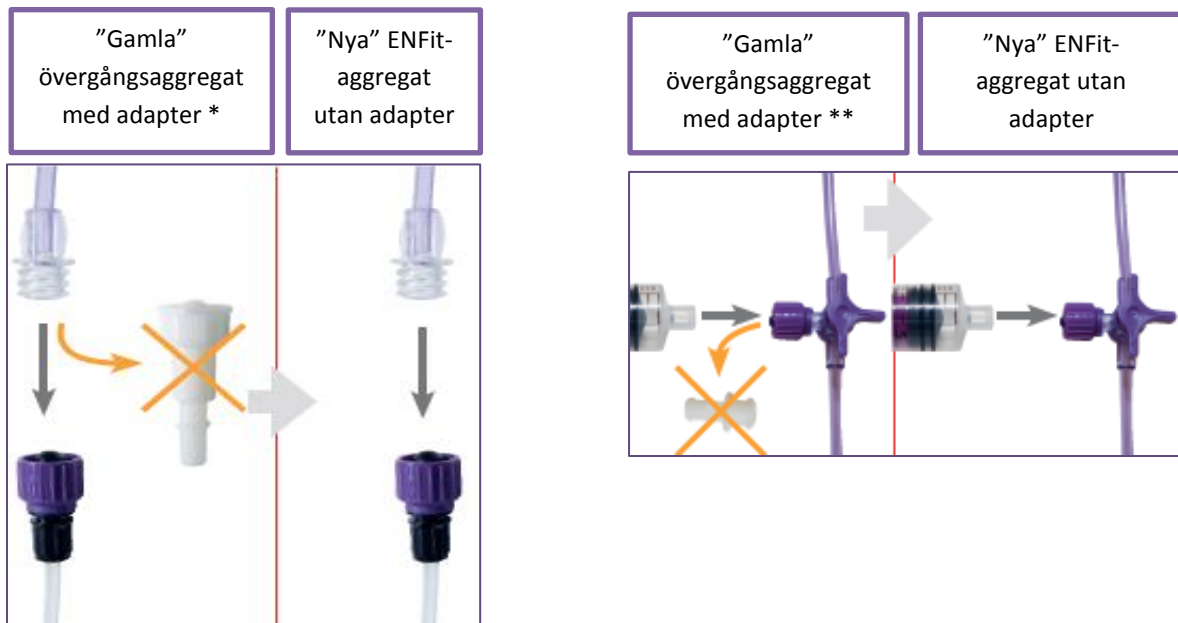

- Säkerställ att sonder, PEG, knappar, gastrostomitub etc också har ENFit-fattning för att passa med aggregaten. Om ej, kan det vara bra att beställa hem lösa adaptrar tills övriga leverantörer hunnit byta till ENFit-fattning. Vänligen se nästa sida för att ta del av Nutricias utbud av adaptrar och engångssprutor med ENFit-fattning.
- Säkerställ att enterala sprutor har ENFit-fattning, för att kunna användas till de nya ENFit-aggregaten. Övriga sprutor passar inte längre till medicinporten. Vänligen se nästa sida för en översikt över Nutricias ENFit-sprutor i storlek 10 ml, 20 ml och 60 ml.

Observera att ENFit-aggregaten behåller samma beställningsnummer som tidigare övergångsaggregat, dvs ni kommer automatiskt få de nya ENFit-aggregaten vid beställning. Nedan finns en sammanställning på beställningsnummer samt gamla och nya Ref nr och EAN koder.






Gammalt Produktnamn	Förp strlk	Gammalt ref nr	Gammal EAN-kod	Best nr
FLOCARE PACK INFINITY PUMPAGG - ÖVERGÅNG	30 ST	58 65 13	8716900563683	20 44 00
FLOC MOBILE PACK INF PUMPAGG - ÖVERGÅNG	30 ST	58 65 19	8716900563805	20 44 01
FLOCARE UNIV PACK INF PUMPAGG - ÖVERGÅNG	30 ST	58 98 24	8716900564284	20 44 02
FLOCARE UNIV PACK DROPPAGG - ÖVERGÅNG	30 ST	58 97 54	8716900564208	21 00 19





Nytt produktnamn	Förp strl	Nytt ref nr	Ny EAN-kod	Best nr
FLOCARE INFINITY PACK PUMPAGGREGAT	30 ST	58 65 14	8716900563706	20 44 00
FLOCARE INFINITY MOBILE PACK PUMPAGGREGAT	30 ST	58 65 20	8716900563829	20 44 01
FLOCARE INFINITY UNIVERSAL PACK PUMPAGGREGAT	30 ST	58 98 25	8716900564307	20 44 02
FLOCARE INFINITY UNIVERSAL PACK DROPPAGGREGAT	30 ST	58 97 55	8716900564222	21 00 19

Följande övergångsadaptrar finns att beställa separat från Nutricia

Användning	Bild	Artikelnr	Ref nr	Antal/ förpackning	Fanns på övergångs- aggregatet
Övergångsadapter till sond/matningsslang med ENLock- eller konfattning		90 05 47	58 97 32	6x5 st	Ja*
Övergångsadapter till ENLock-, oral-, eller luerspruta		90 05 50	58 97 38	6x5 st	Ja**
Stegadapter till sond/matningsslang med konfattning		90 05 51	58 98 28	6x5 st	Nej
Övergångsadapter för ENLock aggregat eller ENLock spruta		90 05 49	58 97 34	6x5 st	Nej
Övergångsadapter till luer-hankoppling		90 05 48	58 97 33	6x5 st	Nej

Följande engångssprutor med ENFit fattning finns att beställa från Nutricia

Produktnamn	Storlek	Artikel nr	Ref nr	Förpackning
ENFIT SPRUTA	10 ml	900543	591421	30 st
ENFIT SPRUTA	20 ml	900544	591422	30 st
ENFIT SPRUTA	60 ml	900545	591423	30 st

Du är alltid välkommen att kontakta Nutricia på telefon 08-24 15 30 eller e-post info@nutricia.se.

Med vänliga hälsningar

Nutricia