

## Flocare® Jejunokath


Komplett jejunostomiset

## Flocare® Jejunokath

Flocare® Jejunokath är en jejunostomikateter för enteral nutrition i samband med ett bukkirurgiskt ingrepp. Flocare® Jejunokath placeras med hjälp av en splitkanyl-teknik. Ingreppet bör ske av kompetent läkare och enligt medföljande instruktioner.

### JEJUNOSTOMISETET INNEHÅLLER FÖLJANDE DELAR

- Jejunostomikateter i polyuretan
  - med röntgentät linje.
  - med fästplatta i silikon för fixering vid bukens utsida.
  - ytterdiameter Ch 5 (grå koppling) eller Ch 8 (blå koppling).
  - längd 50 cm i Ch 5 / 70 cm i Ch 8.
  - med koppling för anslutning till sondmatningsaggregat med kateterkona eller spruta med luerfattning (male luer). För koppling till aggregat med omvänd luerfattning (female luer) används Flocare® koppling som mellanstycke.
- 2 splitkanyler
  - 1 punktionskanyl utan mandrin för hud och bukvägg.
  - 1 punktionskanyl med mandrin för tarmvägg.

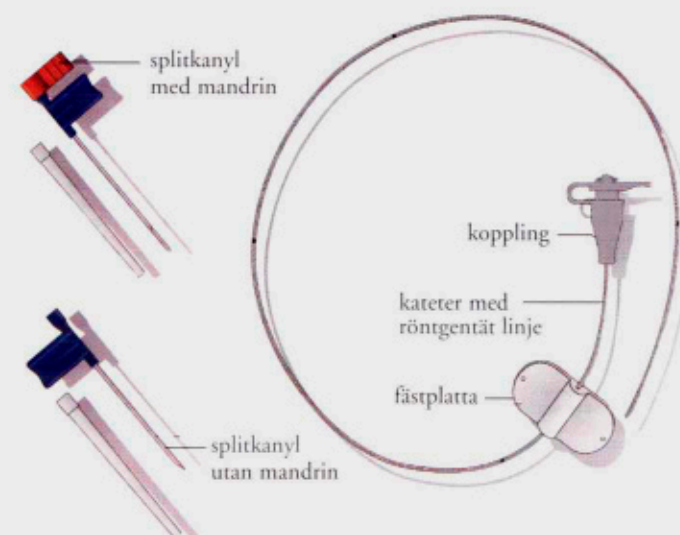

### INDIKATIONER

Enteral nutrition efter bukkirurgi.

### KONTRAIKATIONER

Flocare® Jejunokath skall inte placeras när kontraindikation för bukkirurgi föreligger, exempelvis vid

- ascites
- peritonit

### EVENTUELL KONTRAIKATION

Beroende på patientens tillstånd


- Crohns sjukdom
- strålenterit

**NUTRICIA**

## BRUKSANVISNING

Inläggning av Flocare® Jejunokath skall alltid ske i operationssal.

1. Lämpligt punktionsställe för Flocare® Jejunokath bestäms efter avslutat bukingrepp men innan operationssåret är hopsytt. Idealt är om punktionsstället kan läggas i den mittersta tredjedelen av den linje som sammanbinder navel och revbensbåge (figur 1).
2. Stick snett genom bukväggen med splitkanylen utan mandrin (figur 2).
3. För jejunostomikatetern genom kanylen och in i buken (figur 3).
4. Dra tillbaka splitkanylen och avlägsna den därefter genom att trycka ut vingarna så att kanylen klyvs (figur 4).
5. Flocare® Jejunokath skall som regel placeras i tunntarmen, ca 10-15 cm distalt om Treitz' ligament eller 10-15 cm distalt om den sista anastomosen t ex efter total gastrektomi, ingrepp med roux-en-Y-anastomos eller operation enligt Billroth II (figur 5).
6. Operationsassistenten ska sedan sträcka den del av tunntarmen som valts för tunnelering. Använd splitkanylen med tillbakadragen mandrin för punktion in i tunntarmsväggen (figur 6).
7. För fram den trubbiga mandrinen genom kanylen som sedan förs genom submukosan ca 4-5 cm för att bilda en tunnel (figur 7).
8. Avlägsna mandrinen och stick med den vassa kanylen ner till tarmlumen (figur 8).
9. För den distala änden av katetern (som placerats i buken under punkt 3) genom splitkanylen och längs med tarmlumen (figur 9).
10. Dra tillbaka splitkanylen över katetern och avlägsna den därefter genom att trycka ut vingarna så att kanylen klyvs (figur 10).
11. Fixera den kateteriserade tarmslyngan vid parietala peritoneum med minst två stygn. Detta säkrar kateterläget (figur 11).
12. Reglera placeringen av fästplattan genom att skjuta den längs med katetern. Sy fast fästplattan med två suturer på bukväggen. Sy ihop operationssåret (figur 12).

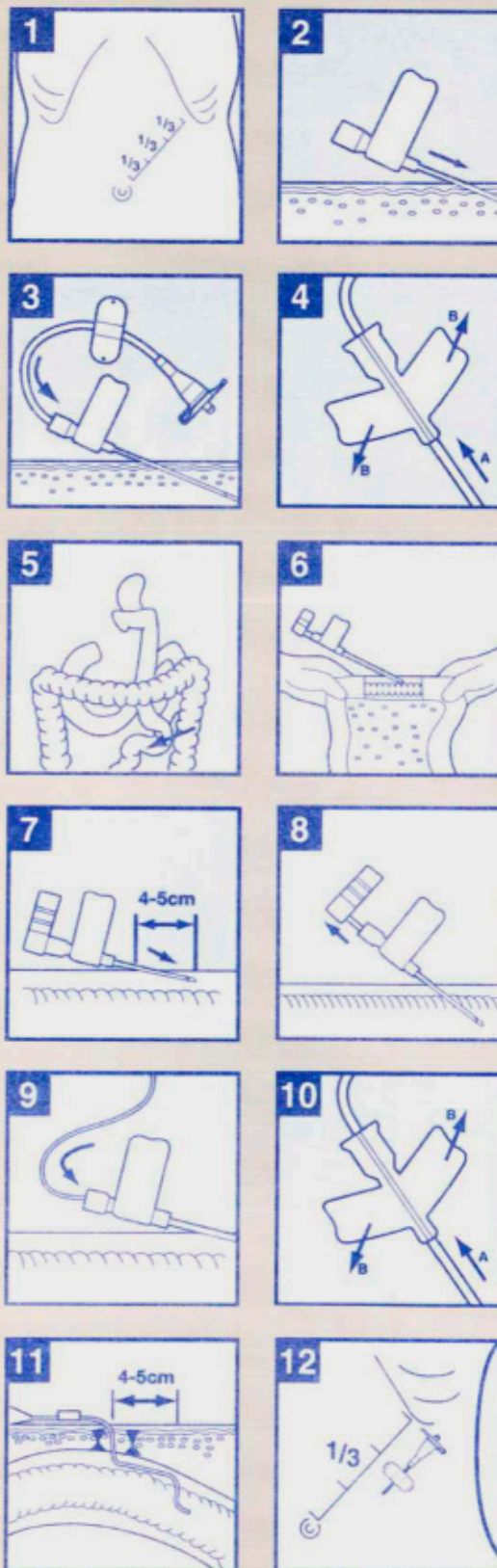

## SKÖTSEL

Tidig postoperativ enteral nutrition minskar risken för atrofi och bakterietranslokation i tunntarmen.

Administration av sondnäring i en Flocare® Jejunokath ska alltid ske med hjälp av en pump för enteralt bruk. Det är av stor vikt att flödes hastigheten kontrolleras.

Kontrollera kateterns läge vid varje byte av sondnäring eller minst tre gånger dagligen.

Spola sonden med 10-25 ml vatten före och efter varje matningstillfälle eller administration av läkemedel. För att förhindra stopp i katetern bör den spolats minst var åttonde timma. Inspektera huden runt fästplattan dagligen, sök efter rodnad och svullnad och desinficera huden kring stomin.

## BORTTAGANDE

Utbyte och borttagande av jejunostomikatetern beror på dess kondition och skall göras under medicinsk uppsikt.

Ta bort suturerna vid fästplattan och dra därefter försiktigt ut sonden.

Beställning: Kronans Droghandel AB, Box 900, 745 25 Enköping. Tel: 0171-41 49 80. Fax: 0171-41 49 99.

Produkt	Best nr	Antal/Förp
Flocare® Jejunokath Ch 5	78 47 71	3 st
Flocare® Jejunokath Ch 8	76 19 24	3 st

**NUTRICIA**

Nutricia Nordica AB, Box 1348, 111 83 Stockholm. Tel: 08-24 15 30. Fax: 08-24 18 80. [www.nutricia.se](http://www.nutricia.se) [info@nutricia.se](mailto:info@nutricia.se)