

Flocare[®] Sonder

Röntgentät nasogastrisk/nasoduodenal sond
med förilagd ledare i flera storlekar



Flocare® Sonder

Flocare® matningssonder är tillverkade i polyuretan och är därför mjuka och smidiga. De är röntgentäta samt har en förlagd följsam ledare för säker och smidig användning.

- förlagd smord ledare
- luer-lock
- längd 110 cm, Ch 6, 8 och 10
- längd 130 cm, Ch 8
- barnsond 50 cm, Ch 5
- röntgentät linje
- mjuk rundad spets med 2 laterala hål
- avståndsmarkeringar var 20:e cm från distala änden
- sondens läge kan kontrolleras genom luftinblåsning med ledaren i
- förslutningspropp är bipackad, extra kan beställas genom Nutricia
- spolstycke (Flush Device) är bipackad, extra kan beställas genom KD, se nedan
- Flocare® Sonder är tillverkade i polyuretan, som är ett mjukt och smidigt material

	Innerdiameter	Ytterdiameter	Färg på koppling
Ch 5	0,89	1,67	Vit
Ch 6	1,05	1,95	Grön
Ch 8	1,75	2,65	Blå
Ch10	2,05	3,30	Svart

Instruktion

Förberedelser

1. Informera patienten om vad som kommer att hända.
2. Se till att patientens näsborrar är rengjorda och undersök genomträngligheten. Om patienten någon gång brutit sitt näsben kan det ha bildats brosk som försvårar införandet av sonden.
3. Mät ut behövd sondlängd;
 - håll sondspetsen mot örsnibben
 - för sonden mot nästippen
 - för sonden utmed patienten ned till nedersta biten av processus xiphoideus
 - markera på sonden utmätt längd

Obs! Om sonden skall placeras i duodenum bör ca 20 cm läggas till.

Beställning:

Flocare® Sonder kan köpas på apotek. Vårdenheter kan beställa direkt från Oriola KD Health Care AB, Box 900, 745 25 Enköping. Tel: 0771-758 758 • Fax: 0171-41 49 99 E-post: ks.sjukvard@oriola-kd.se

Placering av sonden

1. Fukta eventuellt sondspetsen med rekommenderat glidmedel.
2. Be patienten att luta huvudet bakåt.
3. För in sonden sakta och försiktigt via näsan, längs nedre kanten av näsborren.
4. När sonden nått strupen, ta en paus och be patienten luta huvudet framåt och sätta hakan mot bröstet.
5. Fortsätt införandet av sonden. Be patienten att svälja när han känner sonden i halsen och för ner sonden tills tidigare gjord markering är nådd. Införandet kan, om inga kontraindikationer föreligger, underlättas genom att patienten samtidigt dricker lite vatten.
6. Om patienten börjar hosta eller får kväljningar skall sonden omedelbart dras tillbaka.
7. Fäst sonden temporärt med tejp vid patientens näsa.
8. Kontrollera sondens läge genom antingen;
 - auskultation – stöt in 5-10 ml luft i ventrikeln. Auskultera över epigastriet
 - aspiration – aspirera och kontrollera med lackmuspapper
 - röntgen – vid osäkerhet, genomlys eller röntgenkontrollera
9. Dra ur sondens ledare och fäst sonden permanent.

Skötsel av sonden

- spola alltid sonden före och efter matning samt vid uppehåll i matningen
- inspektera näsan dagligen
- spritavtvätta kopplingen dagligen
- kontrollera alltid sondens läge före måltid

Författningshänvisning SOSFS 1988:25



Produkt	Best nr	Antal/Förp
Flocare® sond Ch 5, 50 cm	75 88 39	10 st
Flocare® sond Ch 6, 110 cm	75 88 47	10 st
Flocare® sond Ch 8, 110 cm	20 00 18	10 st
Flocare® sond Ch 8, 130 cm	75 88 62	10 st
Flocare® sond Ch 10, 110 cm	20 00 19	10 st
Spolstycke (Flush Device), vid extra beställning	78 26 64	100 st

Förslutningspropp, extra kan beställas genom Nutricia