

flocare[®] Infinity[™]

TEKNISK SPECIFIKATION

- **Vikt:** 392 g
- **Mått:** 144 x 105 x 50 mm

- **Batteri:** Litium jon-batteri


- **Vattentålighet:** IPX5: Skydd mot vattenstrålar. Kan spolas av under rinnande vatten.



- **Luftsensör:** Optiska sensorer (0,5 - 1 ml)


- **Ocklusionsensör:** Optiska sensorer (\pm 83 kPa)

- **Audiovisuella larm:** Ger avancerad information om:
 - Blockering IN och UT
 - Luft
 - Aggregat saknas
 - Önskad volym har levererats
 - 3 minuter i pausläge
 - Fyll aggregatet
 - Låg batterinivå

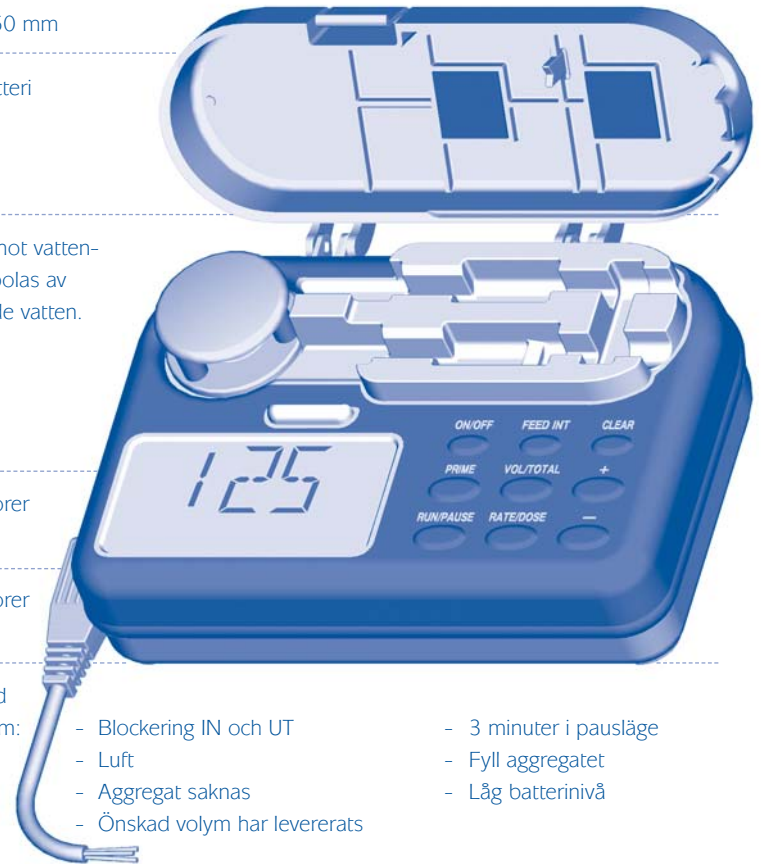

- **Precision vad gäller flödes hastighet:** \pm 5% med Flocaire[®] Infinity[™] Pumpaggregat. Aggregatet byts enligt sjukhusets rutiner, dock senast efter 24 timmar.

- **Fyll aggregatet:** Ett tryck för att fylla aggregatet. Manuell påfyllning

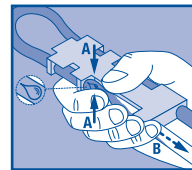

- **Dubbelminne:** Memorerar både programmerat sondmatningsprogram och levererad volym

- **Säkerhet:** Knapparna kan låsas (se Bruksanvisning)

- **Servicekontroll:** Endast vartannat år

- **Garanti:** 3 år



NUTRICIA
flocare[®] Infinity[™]

Fokus på säkerhet och enkelhet

FELSÖKNINGSSCHEMA

Tillstånd	Orsak	Åtgärd
NO SET	<ul style="list-style-type: none"> Aggregatet är inte monterat eller felaktigt monterat i pumpen. Trycksensorn är smutsig. 	<ul style="list-style-type: none"> Stoppa larmet genom att trycka på "START/STOP"-knappen. Sätt in Flocare[®] Infinity[™] -aggregatet i pumpen och stäng luckan. Starta pumpen igen. Rengör sensorerna, sätt in aggregatet i pumpen och starta pumpen igen.
PUSH STRT	<ul style="list-style-type: none"> Pumpen har varit i pausläge över 3 minuter. 	<ul style="list-style-type: none"> Stoppa larmet och förläng pausläget med ytterligare 3 minuter genom att trycka på "START/STOP"-knappen. Programera pumpen och starta den genom att trycka på "START/STOP"-knappen.
END OF DOSE	<ul style="list-style-type: none"> Pumpen har levererat den programmerade dosen=volymen 	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av pumpen genom att trycka och hålla nere "START/STOP"-knappen i 2 sekunder. Nollställ minnet av den totalt levererade volymen. Programmera om pumpen och starta den genom att trycka på "START/STOP"-knappen.
AIR	<ul style="list-style-type: none"> Luftsensorn har upptäckt ett tomt pumpaggregat. Luftsensorn är smutsig. Aggregatet är inte ordentligt insatt. Aggregatet har använts i mer än 24 timmar. 	<ul style="list-style-type: none"> Stoppa larmet genom att trycka på "START/STOP"-knappen. Byt ut den tomma sondnäringsförpackningen och fortsätt sondmatningen. Om nödvändigt, fyll aggregatet. Rengör luftsensorn Se till att aggregatet är ordentligt insatt i pumpen. Byt ut aggregatet mot ett nytt.
BATT pumpen fortsätter att fungera	<ul style="list-style-type: none"> Batterikapaciteten är för låg. Pumpen har inte kapacitet att leverera trögflytande vätskor med höga flödes hastigheter vid nuvarande laddning hos batteriet. 	<ul style="list-style-type: none"> Koppla in batteriladdaren i pumpen och elnätet och ladda i ca 6 timmar. Pumpen kan användas under laddning.
Batterisymbol med "E" och "F" blinkande	<ul style="list-style-type: none"> Batterifel. 	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av pumpen ("OFF"), kontakta din leverantör eller ditt servicecenter för service.
FILL SET	<ul style="list-style-type: none"> Pumpen fyller aggregatet 	<ul style="list-style-type: none"> Tryck på "FILL SET"-knappen igen för att stoppa pumpen och återgå till pausläget.
OCC IN	<ul style="list-style-type: none"> Pumpen har känt av ett uppströms stopp mellan pumpen och sondnäringsförpackningen. Trycksensorn är smutsig. 	<ul style="list-style-type: none"> Stoppa larmet genom att trycka på "START/STOP"-knappen. Tag ut aggregatet ur pumpen och kontrollera om det är stopp genom att spola igenom aggregatet. Sätt tillbaka aggregatet i pumpen och starta pumpen igen. Rengör sensorerna, sätt tillbaka kassetten i pumpen och starta pumpen igen.
OCC OUT	<ul style="list-style-type: none"> Pumpen har känt av ett nedströms stopp mellan pumpen och patienten. Medicinkranen är stängd. Trycksensorn är smutsig 	<ul style="list-style-type: none"> Stoppa larmet genom att trycka på "START/STOP"-knappen. Kontrollera stopp i sonden genom att aspirera vätska via medicinkranen. Rengör sensorerna, återinsätt kassetten i pumpen och starta pumpen igen.
OCC OUT (upprepad)	<ul style="list-style-type: none"> Kalibreringen är inte slutförd för det isatta aggregatet. 	<ul style="list-style-type: none"> Stoppa larmet genom att trycka på "START/STOP"-knappen. Starta pumpen genom att trycka på "START/STOP"-knappen och låt den gå en kort stund. Stoppa pumpen genom att trycka på "START/STOP"-knappen och kontrollera att det inte har inträffat något "occlusion-out"-alarm. Tag bort aggregatet från pumpen, sätt sedan tillbaka det igen. Starta pumpen igen genom att trycka på "START/STOP"-knappen.
LOCK	<ul style="list-style-type: none"> Endast nuvarande sondmatningsprogram är tillåtet för denna patient. Sjukvårdspersonal tillåter inte annat program. 	<ul style="list-style-type: none"> Denna programmeringsfunktion har låst pumpens inställningar. Be sjukvårdspersonal att ändra inställningen.
ERRA- ERRZ	<ul style="list-style-type: none"> Självtestet har upptäckt ett elektroniskt fel. 	<ul style="list-style-type: none"> Stäng av pumpen ("OFF"), se till att pumplucken är stängd och starta pumpen igen ("ON"). Om felet kvarstår, kontakta din leverantör eller skicka in pumpen på service.
Ingen stickkontaktssymbol när pumpen är ansluten till elnätet.	<ul style="list-style-type: none"> Vägguttaget fungerar inte Batteriladdaren är trasig 	<ul style="list-style-type: none"> Koppla in pumpen i ett annat uttag. Kontakta sjukvårdspersonal eller leverantör för att byta ut laddaren.



NUTRICIA

Nutricia Nordica AB, Box 1348, 111 83 Stockholm
 Tel: 08-24 15 30 • Fax: 08-24 18 80
 E-post: info@nutricia.se • www.nutricia.se