





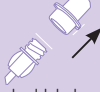
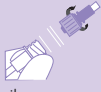
## Sondmatning med pump

För många som får sondnäring rekommenderas nutritionspump och aggregat, för att enkelt kunna ställa in tillförselshastighet och

mängd. Att ge sondnäring med Flocare Infinity pump är enkelt, säkert och tidsbesparande.

### KOPPLA NY SOND-NÄRINGS-FLASKA OCH AGGREGAT

1. 	2. 	3. 
4. 	5. 	6. 

7. 	8. 	9. 	10. 	11. 
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

### TILLFÖRSEL AV SOND-NÄRING

12. 	13. 	14. 
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

### FRÅN-KOPPLING




15. 	16. 		
17. 	18. 	19. 	20. 

### SONDEN SPOLAS PÅ ETT AV FÖLJANDE SÄTT (16 EL. 17)


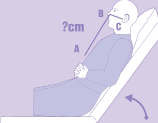


## Sondmatning med aggregat utan pump

1. Skruva fast Flocare droppaggregat på sondnäringsflaskan som bilderna 1-3 i instruktionen till vänster visar.
  2. Kontrollera att rullklämman på aggregatet är stängd.
  3. Häng upp sondnäringsflaskan på t.ex. en droppställning och använd Flocare droppaggregat för gravitationsmatning.
  4. Ta bort skyddshylsan på aggregatet och spara den. Öppna rullklämman långsamt och fyll aggregatet med sondnäring. Stäng rullklämman.
  5. Koppla ihop aggregatet med sonden (vid gastrostomiknapp; koppla ihop aggregatet med kopplingsslangen).
  6. Starta sondmatningen genom att öppna rullklämman på aggregatet. Ställ in tillförselshastigheten genom att räkna droppar per minut i droppkammaren. Justera hastighet med hjälp av rullklämman.
  7. När måltiden är slut, stängs rullklämman.
- OBS!** Kom ihåg att alltid SPOLA aggregatet med vatten efter varje sondmatning.

## Sondmatning (bolus) med enteral spruta

1. 	2. 	3. 
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

## För alla administrationsvägar gäller:

1. 	2. 	3. 	4. 
------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------